

## Neue Materialien Spritzguss

### PEEK - dentinfarben

**Einsatzgebiet:**

*Gerüstwerkstoff  
Modellgusstechnik*

**Verarbeitungsparameter:**

*400° C Temperatur  
60 sec Druckzeit  
8 - 9 bar Druck  
15 min Vorheizzeit*

**Empfohlene Gipse.**

Expant-Granit

PEEK wird als Rohgranulat nach Gramm berechnet.

### Flexidy „80“ neutral

**Einsatzgebiet:**

*Schienentechnik*

**Verarbeitungsparameter:**

*170 - 160° C Temperatur  
60 sec Druckzeit  
6 - 7 bar Druck  
15 min Vorheizzeit*

**Empfohlene Gipse.**

Expant-Granit und Polygranit



Flexidy wird in Blockform mit dem Einzelgewicht von 6 g ausgeliefert.